

Viren wie das Coronavirus werden mitunter beim Sprechen, Husten, Niesen oder auch die Atemluft übertragen.

Unser Mund-Nase-Schutz kann diese Übertragungswege unterbrechen und so effektiv zur Eindämmung einer Verbreitung beitragen, und zwar als mechanische Barriere.

Aber wie verwendet man unsere Masken richtig?

Ein kurzer Leitfaden zum korrekten Einsatz unseres Mund-Nasen-Schutzes:

- » vor dem Anlegen **gründlich die Hände waschen**
- » **Nase und Mund bis zum Kinn abdecken**
- » darauf achten, dass die Ränder **möglichst eng anliegen**
- » am oberen Rand ist ein Draht eingearbeitet, damit können Sie die **Maske an die Form Ihres Nasenrückens anpassen**

Wovor schützen die bocare-Masken?

Bei korrekter Anwendung eignen sich die Masken v. a. für den öffentlichen Gebrauch, bspw. wenn die Abstandsregeln nicht immer so einfach einzuhalten sind, Stichwort Einkauf, öffentliche Verkehrsmittel. Bedenken Sie immer, dass das Tragen einer solchen Maske v. a. die Menschen um sie herum vor Erregern schützt und nur zu einem geringem Teil dem eigenen Schutz dient.



Hochwertiges Vlies von Dupont. Jedes Stück ein Unikat.



Einfache Reinigung und **Wiederverwendbarkeit**.



Einfassbänder aus **Oekotex Baumwolle**.



Gefertigt nach den Anforderungen der **DIN EN 14683**



- » während des Tragens sollten Sie den Mund-Nasen-Schutz **nicht unnötig anfassen oder verschieben**
- » **wechseln** Sie die Maske, **wenn sie feucht ist**
- » nehmen Sie die Maske **über die Laschen ab**, da sich **auf der Maske selbst Erreger** befinden können
- » **waschen** Sie sich im Anschluss wieder **gründlich die Hände**

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die geltenden Verhaltensregeln (Mindestabstand, Husten- und Niesregeln etc.) weiterhin eingehalten werden müssen.

Durch das Tragen einer Maske darf kein falsches Sicherheitsgefühl aufkommen, auch wenn wir damit uns und v. a. andere schützen.

www.bo-care.de | bocare@bomedus.com

Wie reinige ich die bocare-Maske richtig?

Die Schutzwirkung der Maske wird durch den **wasser- und alkoholabweisenden Vliesstoff** gewährleistet. Wenn sie die Maske unter laufendes Wasser halten, werden sie merken, dass der Vliesstoff schlecht Wasser annimmt.

- » **Schmutz auf dem Vliesstoff** können Sie also einfach **abspülen**
- » die **Einfassbänder** können Sie mit einer **milden Seife in Handwäsche reinigen**
- » **trocknen** Sie die Maske **über Nacht an der Luft** oder **bügeln** Sie die Maske **am besten mit einem Dampfbügeleisen trocken**
- » durch das **Dampfbügeln desinfizieren** Sie die Maske auch
- » ist die Maske nicht dreckig, reicht auch **desinfizieren durch Bügeln**

Achtung!

Wir raten dringend zur Handwäsche, da Waschmittel und Schleudern den Vliesstoff zerstören können. Wringen Sie die Maske außerdem nicht aus. Sobald Sie in der Maske Risse oder Löcher bemerken, sollten Sie sie austauschen.